

清潔・簡単・使い捨てマスクの節約!!

とりかえ 口元シート

マスクの内側を清潔に!!
使い捨てマスクだけど
長く使いたい。
そんな時に



*シートは、不織布マスクと同じ素材です。

日本製

ご使用方法




1. マスクの内側の中心にシートを合わせます。



2. マスクの上から押さえシートをなじませます。

「口元シート」をセットしていれば

例えば、こんな時に

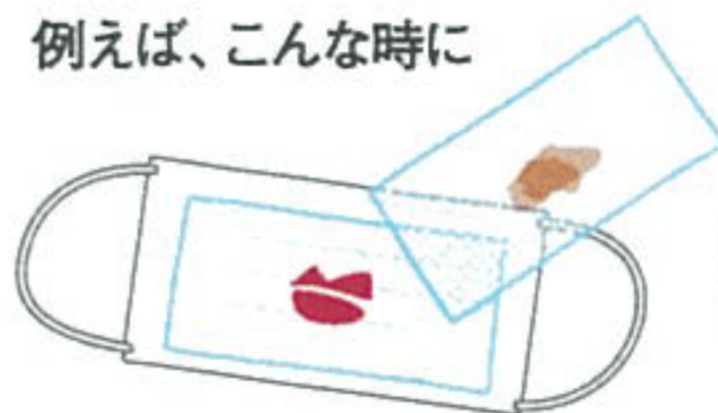

口紅が、食事後によごれが...

簡単・清潔!!



シートを替えるだけ

使用上の注意

- 本品は食べられません。乳幼児の手の届かない所に保管してください。
- 本品は使い切りの商品です。洗濯による再利用はできません。
- 万一、かゆみ、かぶれ、発疹等が生じた場合はただちにご使用を中止してください。
- 万一、においにより気分が悪くなった場合はただちにご使用を中止してください。
- 本品は、ウイルスや有害ガスに対しての効果はありません。

品名	不織布(商品名:口元シート)
素材	ポリプロピレン
サイズ	150mm×80mm
梱包材の材質	ポリプロピレン
製造・販売社名	前田工織株式会社 能登川工場 〒529-1411滋賀県東近江市五個荘河曲町70 TEL (0748) 48-2541 前田工織株式会社 東京本社 〒105-0011 東京都港区芝公園2丁目4番1号芝パークビルA館12F TEL (03) 6402-3941



箱



袋: PP